


# Hier sind Sie Herzsicher!

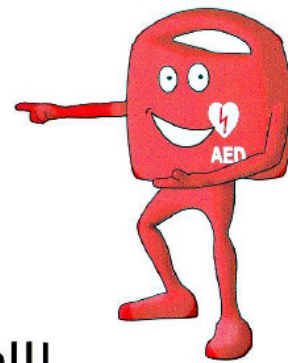

mekontor

Defibrillator nur im Notfall benutzen -  
Die Bedienung ist kinderleicht!

## So reagieren Sie im Notfall!



1. **Ist die Person leblos?**
  - Reagiert diese auf Ansprache?
  - Atmet die Person?



2. **Wenn die Person leblos ist**
  - Alarmieren Sie den Rettungsdienst,
  - wählen Sie die **112**
  - Entnehmen Sie den Defibrillator
  - Fordern Sie weitere Personen zur Mithilfe auf



3. **Beginnen Sie umgehend mit einer Herz-Druckmassage**
  - Führen Sie 30 Herz-Druckmassagen und
  - 2 Beatmungen abwechselnd durch
  - Sobald der Defibrillator bei der leblosen Person ist, einschalten und audiovisuellen Anweisungen folgen



4. **Fortfahren und Abwechseln**
  - Führen Sie diese Maßnahmen bis zum
  - Eintreffen des Rettungsdienstes fort oder die Person weist eindeutige Lebenszeichen auf (normale Atmung!)
  - Sind Sie mit mehreren Personen, wechseln Sie sich bei der Herz-Druckmassage alle 2 Minuten ab



*Sie haben Fragen?*

*Wenden Sie sich an unseren Ansprechpartner vor Ort:*

Oder besuchen Sie unsere Website [www.mekontor.de](http://www.mekontor.de)